

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ I-CAT Vision С ДИСКА

1. Вставить CD диск с исследованием в CD/DVD привод компьютера.
 - Если компьютер настроен на автозапуск - выбираем автозапуск.
 - Если автозапуск отключен запускаем в ручную, можно открыть файлы CD диска и запустить Vision.exe.
2. Компьютер предложит принять лицензию I-CAT.
 - Принимаем.
3. Если компьютер предложит обновить программу I-CAT Vision. Кликаем НЕТ.
 - НЕТ. Установится последняя проверенная версия (ее объем примерно 10 МБ)
4. На вопрос системы «Хотите использовать данные»
Отвечаем - ДА
5. На вопрос системы «Хотите использовать эти данные постоянно (ДА) или временно (НЕТ)»
 - На Ваше усмотрение. При любом клике программа запустится.
 - Если выбрать НЕТ, программа всё равно запустится, но будет храниться только в ОП компьютера. После закрытия программы и извлечения CD диска из привода к.т. исследование из компьютера удалится автоматически.
 - Если выбрать ДА, данные исследования запишутся на жесткий диск компьютера и будут там храниться.
6. Ждем, когда компьютер обработает данные.
7. После ожидания открывается программа в полноэкранном формате.
- 8.левой кнопкой мыши кликаем (подсвечиваем) фамилию пациента
 - Внизу появляется строка
 - Кликаем по СТ левой клавишей мыши.
9. В открывшемся диалоговом окне нажимаем на «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»