



ЗОЛОТОЕ
СЕЧЕНИЕ

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ OnDemand3D С ДИСКА

1. Вставьте диск в дисковод.
2. Запустите файл "CDViewer".
3. Дождитесь установки «CDViewer»
(если программа не установлена) и запуска «Ondemand3D».
4. В открывшемся окне программы дважды щёлкните по фамилии пациента.
5. Двойным щелчком запустите проект
(цветные кубики, а не черные!) с описанием
интересующего исследования.
6. Подтвердите щелчком по клавише «открыть».