

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ I CAT Vision/EXAM VISION

1. Перейдите по ссылке предоставленной в письме.
2. Нажмите на кнопку «СКАЧАТЬ».
3. Перенесите скаченный файл на рабочий стол компьютера.
4. Разархивируйте файл в одноименный.
5. Если программа I Cat Vision/Exam Vision не установлена на Ваш компьютер, скачайте ее перейдя по ссылке «Скачать программу I Cat-Vision», предоставленной в разделе «ПОМОЩЬ» на нашем сайте GS3D.ru.
6. Запустив программу I Cat Vision/Exam Vision, импортируйте в нее исследование пациента:
 - Кликните в верхнем левом углу кнопку «СЕРВИС»
 - В открывшемся окне кликните «ИМПОРТ ИССЛЕДОВАНИЯ»
 - В открывшемся окне кликните «ОБЗОР»
 - Найдите папку с исследованием и один раз кликните по ней
 - Нажмите кнопку «ОК» далее нажмите кнопку «ИМПОРТ»
7. Ждем когда компьютер обработает данные.
8. Кликаем один раз (подсвечиваем) фамилию пациента:
 - Внизу появиться строчка
 - Кликаем по СТ
9. В открывшемся диалоговом окне кликаем на «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ».