

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ OnDemand

1. Перейдите по ссылке предоставленной в письме.
2. Нажмите на кнопку «СКАЧАТЬ».
3. Перенесите скаченный файл на рабочий стол компьютера.
4. Разархивируйте файл в одноименный.
5. Зайдите в папку и запустите файл «CDViewer.exe».
6. Дождитесь установки «CDViewer»
(если программа не установлена) и запуска «OnDemand3D».
7. В открывшемся окне программы дважды кликните по ФИО пациента.
8. Двойным кликом запустите проект
(цветные кубики, а не черные!) с описанием
интересующего исследования.
9. Подтвердите кликом по кнопке «ОТКРЫТЬ».