

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ Romexis

1. Перейдите по ссылке предоставленной в письме.
2. Нажмите на кнопку «СКАЧАТЬ».
3. Перенесите скаченный файл на рабочий стол компьютера.
4. Разархивируйте файл в одноименный.
5. Зайдите в папку и запустите файл:
 - Romexis_viewer_min.exe для операционной системы Windows
 - Romexis_Viewer_OS_X.app для операционной системы Mac OS
6. В открывшемся окне сверху выберите язык программы.
7. При первом запуске программы нажмите кнопку «УСТАНОВИТЬ»
8. Дождитесь установки программы.
9. В окне программы выберите ФИО пациента.
10. Нажмите кнопку «Запустить Viewer».